

Instruktionsguide

DressBuddy® - KOMBI - PÅ/AF

Til på- og afgang af støtte- og kompressionsstrømper med åben/lukket tå



DressBuddy®



Friktionsplade



Slip - fod

Påtagning



Læg strømpen på langs inde i DressBuddy'en med **hælen op ad.**



Placer strømpen over de gule kugler, således at kantbåndet er lige over dem. Tag evt. én kugle ad gangen.



Som vist på billedet, bør strømpen nu være på plads på DressBuddy'en.



Sæt slippet fast i strømpen. Før foden ind i strømpen og træk i DressBuddy. Hvis det kniber med at få hælen helt ind i strømpen – så prøv at dreje DressBuddy'en den lidt til siden og kræng den rundt om hælen.



Træk strømpen op til læggen. Lav nu små korte gnid fremad med hælen på pladen, så strømpen kommer helt rundt om hælen.



Træk nu i DressBuddy, så strømpen kommer helt op til under knæet, og frigør strømpen fra kuglerne.



Træk nu slippet ud af strømpen ved at trække i den farve, der vender ind mod strømpen – og altså væk fra benet.

Ved brug af strømpe med "åben tå", bør foden presses ned på pladen, så strømpen ikke glider med slippet op.

Aftagning



Sæt de blå kugler på DressBuddy'en ind i hver sin side af strømpen lige rundt om kantbåndet på strømpen og **bag på** læggen.



Skub nu DressBuddy'en ned langs benet så langt det er muligt. HUSK at pladen skal placeres længere fra stolen end ved påtagning – dog skal den stadig kunne nås med hælen.



Sæt DressBuddy'en på friktionspladen og træk foden ud af strømpen med små korte ryk bagud indtil strømpen kommer ned til over hælen.



Når strømpen skal det sidste stramme stykke rundt om hælen, gnid da hælen tilbage på pladen med små korte ryk.

Når strømpen er kommet omkring hælen kan foden helt ud af strømpen. Husk at pladen stadig kan bruges her.

Vidste du, at Danish CARE Supply har et bredt sortiment indenfor personlige hjælpemidler til f.eks. på- og afklædning, personlig pleje, spiseredskaber,... m.m...

Besøg vores hjælpemiddel butik i Randers eller vores hjemmeside, hvor du har mulighed for at købe alle produkterne i vores e-shop; www.danishcaresupply.dk.