

Instruktions-vejledning til Butler – OFF

Anvendes til aftagning af kompressionsstrømper



Metoden:

- 1) Sæt skohornet ind under strømpens kant
- 2) Pres nu forsigtigt ned, så strømpen glider ned af læggen
- Sørg for, at Butleren har kontakt med huden hele tiden
- 3) Når strømpen er som vist på billede 3 – så løftes hælen op, så den kan komme rundt om hælen og ind under foden. Pas på: Hvis strømpen trykkes ned mod gulvet – kan strømpen gå i stykker.
- 4) Tryk nu strømpen fremad, indtil strømpen kommer af foden