

# permobil

**WORLD LEADER IN ADVANCED REHAB TECHNOLOGY**

# **ROHO – Dry Flotation**

**Kort fortalt**

## **Huskenoter til indstilling af ROHO produkter**

Kort fortalt:

## ROHO DRY FLOATATION - Luft er, som vand et dynamisk medie

### Trykdistribution


- Peak pressures reduceres
- Et konstant tryk opretholdes, selv om borgeren bevæger sig på puden eller madrassen

### Lav overfladespænding


- Minimal huddeformitet under nedsynkning vs. skum

### Minimal shear og friktion

- Materialet følger borgers bevægelser

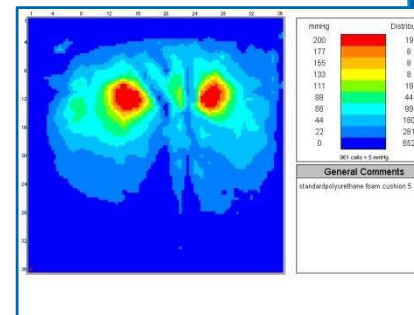

Skumpude

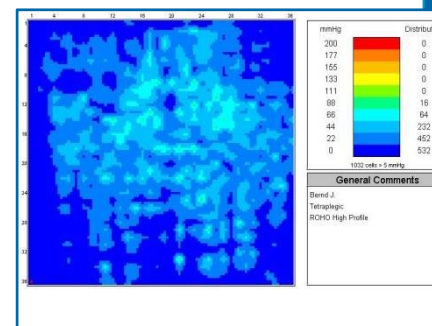


ROHO  
HIGH PROFILE®  
Quattro Select

# Håndtest af ROHO produkter



Indstilling af ROHO puder – med atmosfærens tryk som udgangspunkt:

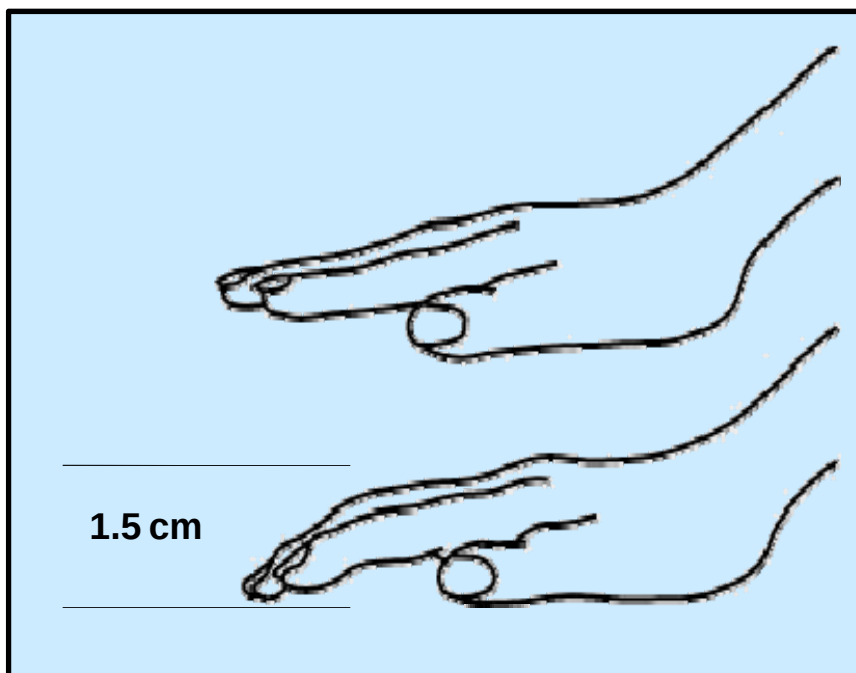

- Overpust puden
- Lad ventilen være åben indtil luften stopper med at sive
- Luk ventilen (den har nu atmosfærisk tryk)
- Sæt borger på puden
- Slip så meget luft ud at der er ca. 1-2 cm luft mellem pudens bund og der hvor borger stikker dybest  
NB brug engangs-glidmateriale
- Indstilling af luftfordelingen i pudens fire kamre sker med **grøn knap** trykket ind på isoflo-kontrollen. Når ønsket korrektion er foretaget trykkes **rød knap** ind

# Indstilling af ROHO puden

Puden er ikke punkteret hvis der er luft i alle fire hjørner når borger sidder på puden



## Pudens kamre:

- Pudens består af 4 kamre
- IsoFlo på **grøn** = 1 kammer
- IsoFlo på **rød** = 4 kamre

Isoflo-kontrollen skal altid vende fremad – mellem borgers ben. VIGTIGT da puden ofte er special-indstillet til borger.



## Boger skridder frem i stol:

- Sørg for at IsoFlo kontrollen er på **grøn**
- Løft benene op
- Hold position i ca 3 sekunder
- Tryk IsoFlo-kontrollen på **rød**



## Korrigerung af bækken og hoftevinkel:

- Pudens indstilles ved følgende eksempler iht. princip i foregående eksempel
- Ved fikseret asymmetrisk bækken indstilles m.h.p. at imødekomme skævhed og stabilisere siddestilling



- Ved ufikseret asymmetrisk bækken kan borger rettes op i puden, evt. over tid
- Ved ben-amputationer presses stumpen ned i materialet for at sikre ens hoftevinkel i de to sider



## Aktiv siddestilling eller øget hoftevinkel = kilepude:

- Luften presses bagud i puden evt. ved at borger læner sig frem.
- IsoFlo trykkes på **rød** og borger retter sig op